



## CATÁLOGO DE PRODUCTOS SEPTIEMBRE 2018

“ **Equilibrio y armonía** son la meta de la **equilibriodonzia** que recoge la tradición del funcionalismo y la integra con la moderna investigación científica




“ **Equilibrio y armonía** son la meta de la **equilibriodonzia** que recoge la tradición del funcionalismo y la integra con la moderna investigación científica

# EQUILIBRIODONZIA

La mejor aliada del odontólogo en restablecer la armonía dental

El Equilibrador M.E.A. está disponible en más de 30 modelos, realizados en 5 variantes de material con diferente dureza. Son el fruto de un trabajo que ha implicado empresas importantes con diversa competencia en el campo químico y tecnológico, con el fin de proporcionar al odontólogo una buena ayuda para optimizar al máximo el resultado de la terapia. Presentan particulares innovaciones, una fuerte propensión a expandir el arco y el paladar y un marcado tramo lingual para favorecer la posición de la lengua en el spot palatino.

Todos los Equilibradores Eptamed están protegidos por 6 patentes industriales y 12 de diseño innovador.

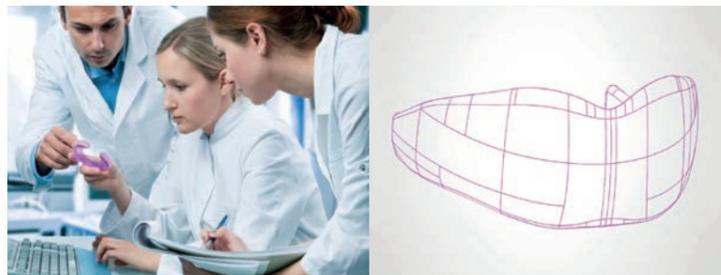

Ligero en el material y en las líneas

Permite tratar ambos arcos simultáneamente

Tramo lingual aumentado

Adaptable y cómodo para cada paciente

Ayudas clínicas en las modificaciones

Amplio escudo para solucionar la apnea nocturna

Paredes oblicuas para favorecer la expansión



FABRICADOS CON NUEVOS COLORANTES NATURALES



FABRICADOS EN ITALIA

## Equilibrador eptamed

La elección del equilibrador se hace en base a la clase dental en la cual se encuentra el paciente (I, II o III clase) o en base a la prioridad o finalidad que se quiere dar a la terapia, (expansora, dar forma cuadrada).

La elección del **material y de la dureza** indicada para el paciente puede ser determinada por un test kinesiológico, por un test de contacto alérgico en el antebrazo o por la experiencia del odontólogo. Después de haber tomado las impresiones y desarrollado el modelo, se mide con una regla la distancia entre las cúspides palatinas de los 4 superiores (14 y 24). Por la medida en milímetros se encuentra el equilibrador adecuado. Cuando todavía hay dientes de leche, la distancia que hay que tomar está entre las cúspides palatinas de 54 y 64 (D).

Todos los equilibradores están estudiados y diseñados para armonizar la función de la boca, así que cada modelo tiene propensión a:

- Expandir el arco
- Aislar los contactos dentales
- Guiar la lengua al spot
- Favorecer la respiración nasal
- Corregir la masticación
- Armonizar el rostro
- Equilibrar la posición de los dientes
- Limitar la hiperactividad labial



## El equilibrador está disponible en los siguientes materiales:

### Termoplástico

<b>Color agua</b> realizado en termoplástico muy suave	más blando
<b>Color lavanda</b> realizado en termoplástico suave	más vendido
<b>Color naranja</b> reemplazará el color lavanda	
<b>Color menta</b> realizado en termoplástico de dureza media	más resistente

Termoplástico de dureza comprendida entre 40 y 65. El termoplástico es una clase de polímero, es decir una combinación de polímeros compuesta de un plástico y una goma con una elevada propiedad termoplástica y elastómera. La estructura de la combinación está compuesta en específico por estireno-etileno butileno-estireno, el compuesto ha elevado propiedades técnicas que lo vuelven extremadamente ligero y esterilizable en el autoclave. El material utilizado además es biocompatible, conforme a la normativa USO CL. VI. Gracias a esta característica las reacciones alérgicas son extremadamente raras.

### Tecno caucho

<b>Color nieve</b> realizado en tecno caucho suave	más elástico
---	--------------

Tecno caucho con dureza comprendida entre 45 y 50. Según la suavidad solo existen los modelos color agua. El tecno caucho es un material sin látex, creado para resolver el principal problema del caucho tradicional es decir: poroso por lo tanto no higiénico, alergénico hasta el shock anafiláctico, no natural ya que necesita de al menos 12 compuesto químicos para ser vulcanizado. El tecno caucho es la mejor solución en cuanto a garantizar la máxima higiene, es insípido, es hipo alergénico y también biocompatible. Además este nuevo compuesto tiene una resistencia y una elasticidad única que lo hacen la mejor alternativa.

# EQ. SERIES Ix

## CONFORMADOR MODIFICABLE



El equilibrador 1.3x es el último dispositivo nacido en el centro de investigación de Eptamed que reúne todo el saber hacer en estos últimos años de investigación y estudio clínico.

El resultado es un dispositivo extremadamente eficaz tanto para el reequilibrio de la deglución como para el reposicionamiento dental que resulta gracias a la nueva conformación de las paredes laterales modificadas en altura y en anchura.

El plano oclusal es modificable y adaptable a la clase dental y a la eventual presencia de los ocos.

La parte anterior se caracteriza por una forma alargada que da un fuerte impulso a la deglución y a la corrección de la clase dental.

Para su mejor utilización el modelo 1.3x, al ser un dispositivo extremadamente modificable que induce veloces cambios dentales, necesita ser modificado y utilizado por profesionales ya formados, por esto se vende en exclusiva sólo a cursistas Eptamed.

Modelo	Distancia cúspides palatinas (14 y 24)	Material
1.3x	Desde 27 al 33	●

- Ideal para tratamiento de clases I,II y III dentales con modificaciones apropiadas
- Ideal para sobremordidas
- Ideal en el caso de mordidas cruzadas
- Sólo para ser usado con dentición permanente
- Caja pequeña para llevar el equilibrador de color blanco



# EQ. LINGUAL



Los EQ. Lingual son dispositivos extremadamente cómodos aptos tanto para niños como adultos, tienen como objetivo el correcto posicionamiento de la lengua.


La ausencia de un contacto bi-labial impide el ejercitar una presión negativa en el interior de la cavidad oral y por consiguiente lleva a la imposibilidad de incurrir en la succión-deglución cuando el paciente se traga la saliva. La lengua está posicionada correctamente tanto en el punto como en la parte trasera durante la fase de empuje, contribuyendo a una mejor expansión del paladar. Estos dispositivos a pesar de que no vengan en contacto con los dientes tiene una extraordinaria capacidad ortodóntica.

- Perfecto también para los niños muy pequeños
- Muy cómodo al llevarse puesto
- Agilizan el tratamiento en los adultos
- Facilitan la expansión palatal
- Requieren poco compromiso por parte del paciente
- Pueden asociarse a la utilización del equilibrador

Modelo	Edad de uso	Material
NIKI 1	De los 3 a los 9 años	●
NIKI 2	De los 9 a los 99 años	●

- Ideal en el tratamiento de las clases I,II y III
- Ideal para mordidas abiertas
- Ideal para resaltes
- Ideal para mordidas cruzadas
- Ideal para sobremordidas
- Pequeña caja para llevar el equilibrador de color blanco

# BITE YOTA

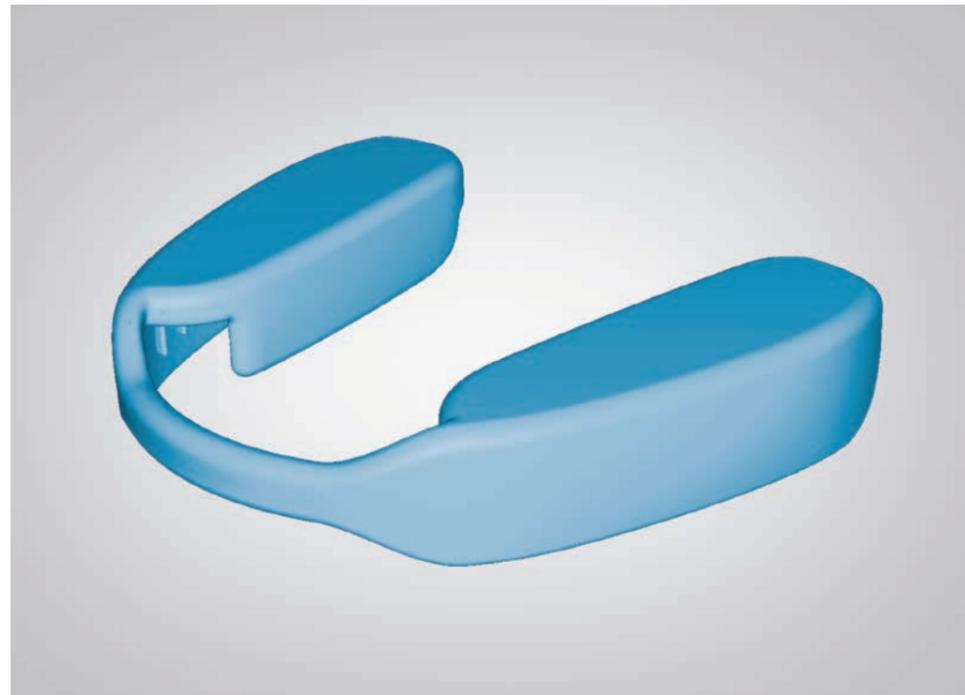


The Bite Yota is a device for daytime use that is able to relax the muscles and improve posture guaranteeing maximum comfort. It can be used in combination with the balancers as a way to unblock or to give greater relaxation thanks to its ease of use during sporting activities or social life.

- Perfecto para los deportistas
- Permite hablar mientras se utiliza
- Velocidad de terapia tradicional con los EQ.
- Óptimo para neutralizar los defectos de la oclusión
- Puede ser puesto en el arco inferior o superior
- Ideal para el 80% de las bocas de los mayores de 15 años

Modelo	Distancia cúspides palatinas (14 y 24)	Material
YOTA	Desde 25 a 35 mm	●

- Ideal para tratamiento de clases I y II
- Ideal para resaltes
- Ideal en el caso de mordidas cruzadas
- Caja pequeña para llevar el equilibrador de color blanco

# EQ. GENIUS OPTIMIZADOR POSTURAL

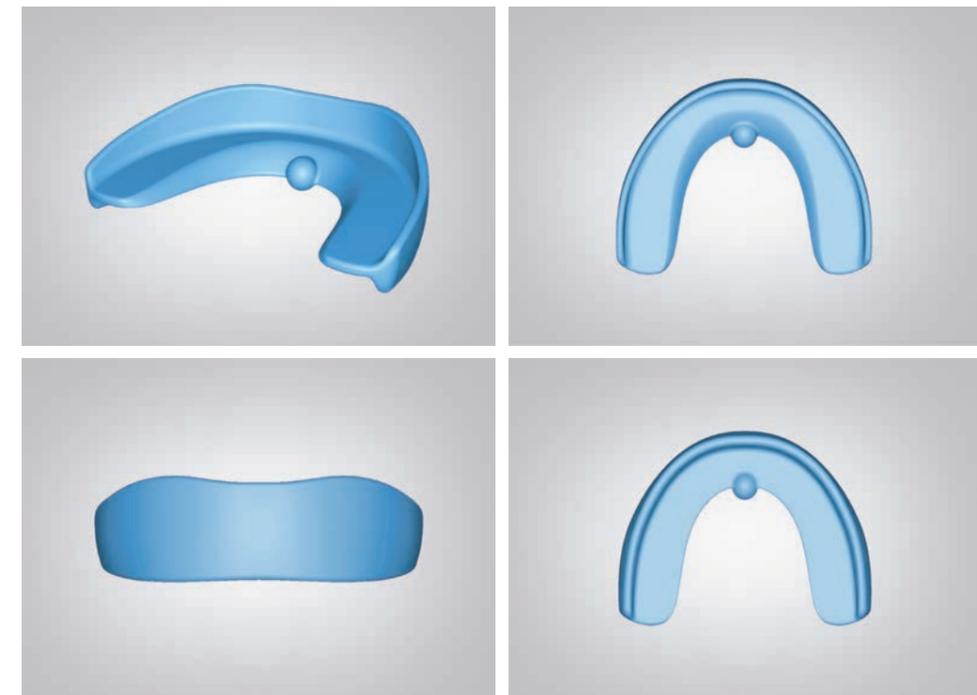


El equilibrador Genius es estudiado para interactuar con la terapia ortodóntica, estimulando y facilitando la movilidad de las suturas craneales. El plano masticatorio de este equilibrador es estudiado para también acoger brackets y alineadores. **En colaboración con el doctor Alessandro Carrafiello.**

- Protege la mucosa de aftas y laceraciones
- Aumenta la propiocepción
- Aumenta el equilibrio masticador
- Agiliza la terapia
- Estabilizan los resultados a lo largo del tiempo al reducir el riesgo de recurrencia

Modelo	Distancia cúspides palatinas (14 y 24)	Material
G3	Desde 25 a 30 mm	●
G4	Desde 31 a 36 mm	●

- Ideal en el tratamiento de las clases I y II asociado con el uso de férulas transparentes y/o brackets
- Pequeña caja para llevar el equilibrador de color naranja claro

# EQ. UNIVERSAL

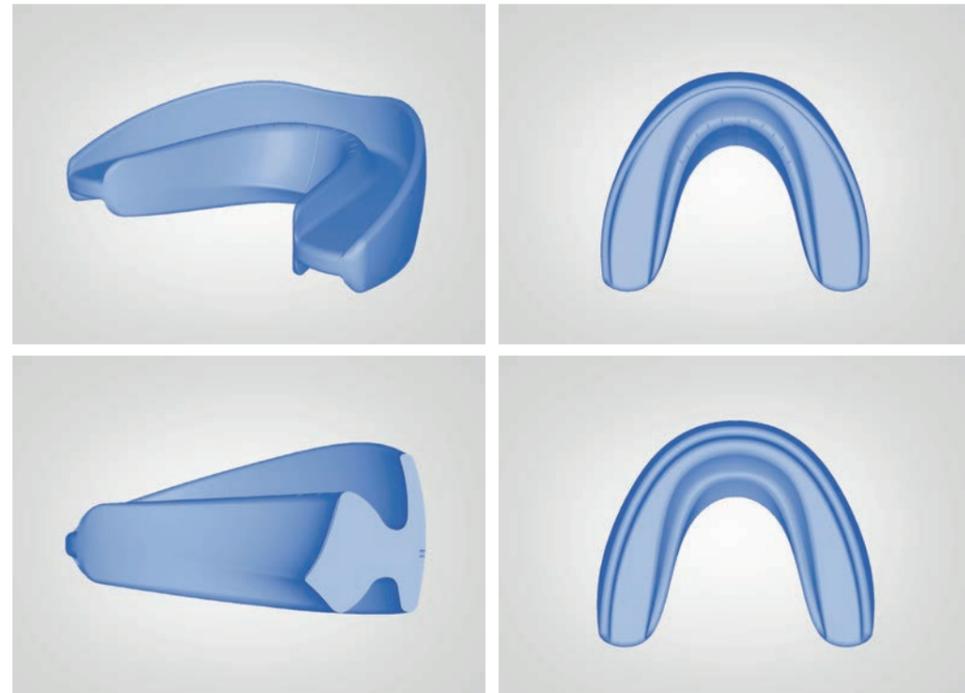

El equilibrador universal abarca un campo de acción universal:

- Ideal como primer modelo
- Adecuado para atletas profesionales
- Desbloquean y relajan el maxilar
- Reequilibran la función alterada de la boca
- Ideal en los roncadors y en la apnea nocturna
- Cómodo y fácilmente adaptable a bocas con prótesis bucal

Modelo	Distancia cúspides palatinas (14 y 24)	Material
U.3	Desde 26 a 31 mm	● ●
U.4	Desde 31 a 36 mm	● ●

Ideal para tratamiento de clases I y II

Caja pequeña para llevar el equilibrador de color azul

# EQ. SL



El equilibrador SL es el dispositivo más innovador a la venta del panorama ortodóntico, en efecto fusionando el estímulo funcional con el estímulo mecánico gracias a su conformación y a la alternancia de materiales rígidos y blandos.

- Único dispositivo del mundo “dos en uno”
- Fundamental para una expansión controlada de los arcos
- Ideal en todo tratamiento ortodóntico
- Versión dura de color transparente, indicada para el bruxismo

Modelo	Distancia cúspides palatinas (14 y 24)	Material
SL.3	Desde 25 a 30 mm	● ○
SL.4	Desde 31 a 36 mm	● ○

Ideal para tratamiento de clases I, II y III con posibilidad de modificación

Ideal para sobremordidas

Caja pequeña para llevar el equilibrador de color transparente

# EQ. SERIES I CONFORMADORES




Los equilibradores de serie I abarcan un campo de acción extremadamente amplio y completo, que lo hace el modelo más utilizado entre todos los equilibradores.

- Reeducan la función masticatoria
- Desbloquean los maxilares
- Sirven como alineación dental
- Excelentes para el bruxismo
- Ideales para el tratamiento del síndrome de la apnea obstructiva

Modelo	Distancia cúspides palatinas (14 y 24)		Material
1.0	Desde 12 meses a 3 años		●
1.1	Desde 3 a 6 años		●
1.2	Desde 23 a 27 mm		○ ● ●
1.3	Desde 28 a 31 mm		○ ● ●
1.4	Desde 32 a 35 mm		○ ● ●

- ✓ Ideal en el tratamiento de las clases dentales I, II y III con posibilidad de modificación
- ✓ Ideal para resaltes
- ✓ Ideal para sobremordidas
- ✓ Ideal en casos de mordida cruzada
- ✓ Pequeña caja para llevar el equilibrador de color azul

# EQ. SERIES I CUADRADOS RANGO 4

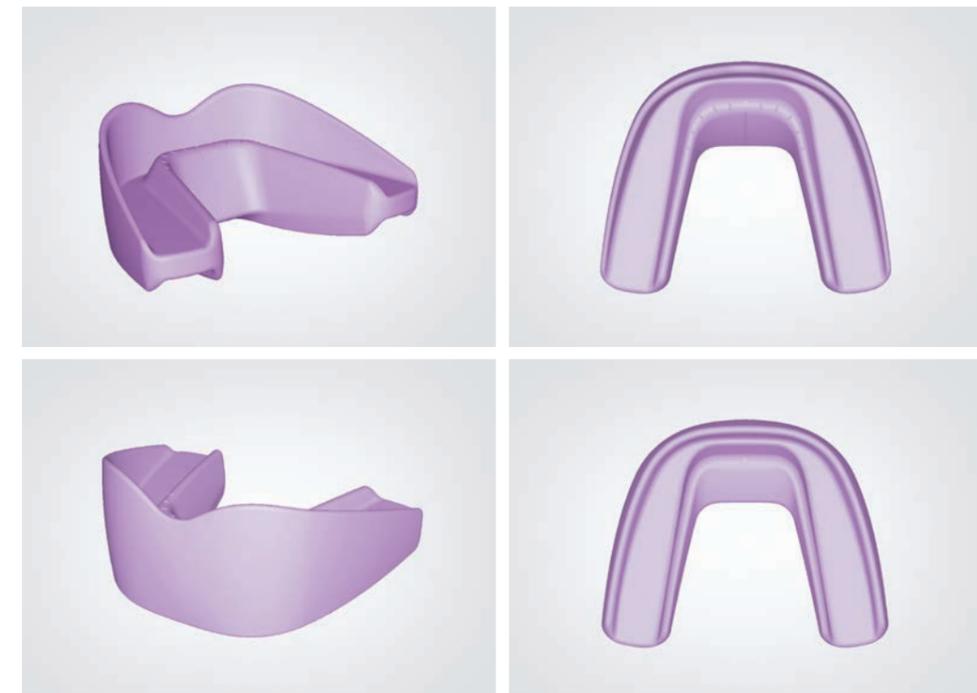

Cuadrado en ambas arcadas. Los equilibradores de clase I cuadrados presentan una ligerísima ranura. Pueden ser utilizados para finalizar la terapia o desde enseguida en el caso de que el paciente presente naturalmente un alineamiento de los incisivos inferiores y superiores.



- Ideales en los arcos ya cuadrados
- Para finalizar el resultado del perfecto equilibrio cráneo-oclusal según las leyes de Planas
- Óptimos también como expansor gracias a las paredes aumentadas

Modelo	Distancia cúspides palatinas (14 y 24)	Material
2.Q	Desde 23 a 27 mm	○ ● ●
3.Q	Desde 28 a 31 mm	○ ● ●
4.Q	Desde 32 a 36 mm	○ ● ●

- ✓ Ideal para tratamiento de clases I, II y III con posibilidad de modificación
- ✓ Ideal para sobremordidas
- ✓ Ideal en casos de mordida cruzada
- ✓ Caja pequeña para llevar el equilibrador de color azul

# EQ. SERIES C CUADRADO

# EQ. SERIES II

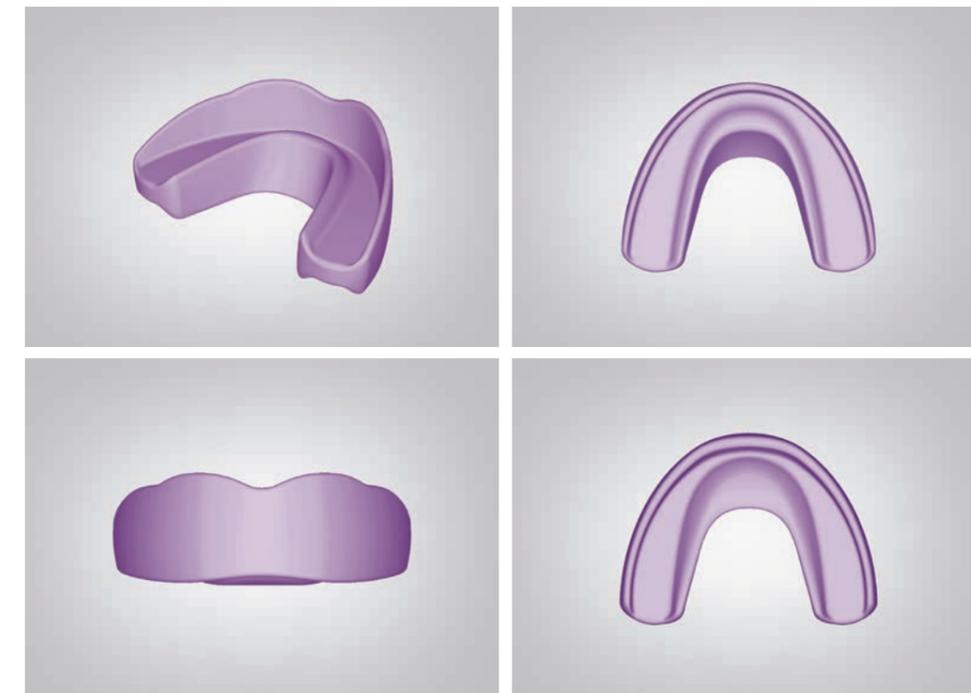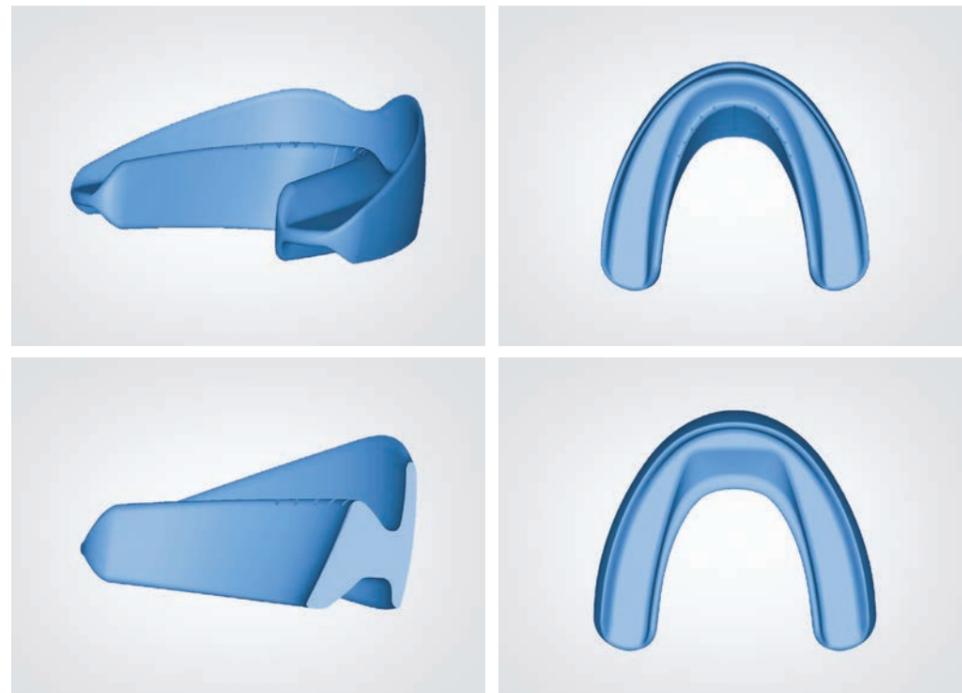

Cuadrados sólo en la arcada inferior. El equilibrador serie C cuadrado permite un alineamiento en línea recta solo en el arco inferior. Pueden ser utilizados para finalizar la terapia o desde el principio en el caso de que el paciente presente naturalmente un alineamiento de los incisivos inferiores.

- Ideales en el caso de duda sobre la redondez o cuadratura del arco inferior
- Para finalizar el resultado del perfecto equilibrio cráneo-oclusal según las leyes de Planas
- Óptimos para reeducar la deglución

Modelo	Distancia cúspides palatinas (14 y 24)	Material
C.2	Desde 24 a 27 mm	●
C.3	Desde 28 a 31 mm	●
C.4	Desde 32 a 34 mm	●

### Plus Series - Aumentan la expansión

Modelo	Distancia cúspides palatinas (14 y 24)	Material
C3P	Desde 28 a 32 mm	○ ● ●
C4P	Desde 32 a 36 mm	○ ● ●

- ✓ Ideal para tratamiento de clases I y II
- ✓ Ideal para sobremordidas
- ✓ Ideal para resaltes
- ✓ Caja pequeña para llevar el equilibrador de color azul

Los equilibradores de serie II son los ideales para las mordidas profundas ya que tienen un espesor mayor a nivel posterior para facilitar el avance mandibular.

- Sustentan el deslizamiento mandibular
- Favorecen la adaptación anatómica de la ATM
- Óptimos para mordida abierta anterior y lateral
- Ideales para las mordidas profundas de los adultos
- Óptimos para modificar la actividad muscular asociada a la maloclusión

Modelo	Distancia cúspides palatinas (14 y 24)	Material
2.2	Desde 24 a 28 mm	○ ● ●
2.3	Desde 29 a 33 mm	○ ● ●

- ✓ Ideal para tratamiento de clases I y II
- ✓ Ideal para sobrealimentaciones en adultos
- ✓ Ideal para sobremordidas
- ✓ Ideal para las mordidas abiertas
- ✓ Pequeña caja para llevar el equilibrador de color amarillo

## EQ. SERIES III



El equilibrador de la serie III tienen la característica de tener un escudo vestibular inferior largo y grueso, que ejerce una presión de retrusión en la mandíbula.


- Estimula el crecimiento del maxilar superior en sentido transversal y anterior-posterior
- Adaptable tanto si es una mandíbula redondeada o una cuadrada
- Incrementa la rampa lingual para favorecer la posición de la lengua en el spot

Modelo	Distancia cúspides palatinas (14 y 24)	Material
3.2	Desde 25 a 27 mm	● ●
3.3	Desde 28 a 31 mm	○ ● ●
3.4	Desde 32 a 36 mm	○ ● ●

ideal en el tratamiento de la clase dental III

Pequeña caja para llevar el equilibrador de color naranja

## EQ. EXPANSOR

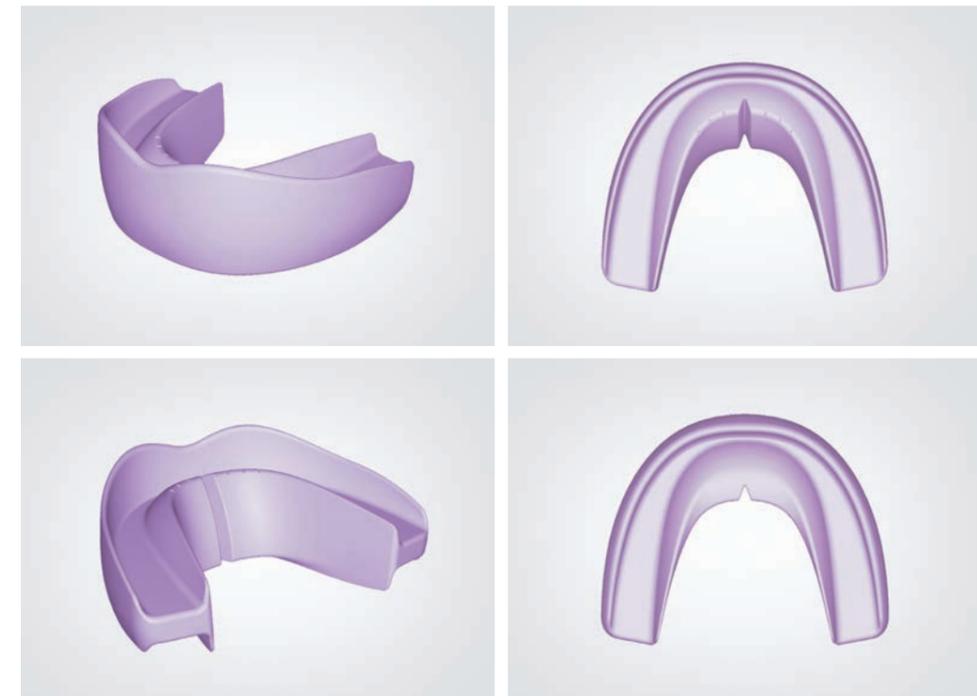

El equilibrador expansor es necesario para acelerar la expansión de los arcos. Gracias a las paredes reforzadas y mejoradas, ejerce una presión transversal sobre todos los molares y premolares inferiores y superiores.

- Nuevo modelo más cómodo con mayor capacidad expansiva
- Óptimo para la mordida cruzada
- Favorece la expansión transversal de ambos arcos

Modelo	Distancia cúspides palatinas (14 y 24)	Material
∞ 2	Desde 23 a 28 mm	● ●
∞ 3	Desde 29 a 34 mm	● ●

Ideal para tratamiento de clases I, II y III con posibilidad de modificación

Ideal en casos de mordidas cruzadas

Caja pequeña para llevar el equilibrador de color verde

¿Alguna vez lo pensaste?  
Tu equilibrio es mérito de tu sonrisa



“ Equilibrio y armonía son la meta de la **equilibriodonzia** que recoge la tradición del funcionalismo y la integra con la moderna investigación científica.

[www.eptamed.com](http://www.eptamed.com)

## ASESORAMIENTO

Medios innovadores de asesoramiento para optimizar la terapia con los equilibradores



### Realización de modelo en resina y elección del equilibrador idóneo

Enviándonos las impresiones de las arcadas y registros de mordida tomadas sencillamente con la silicona o en alternativa el expediente realizado por un escáner intraoral, realizaremos el modelo ortodóncico en 3D. Estudiaremos el caso y elegiremos el modelo de equilibrador más idóneo en el caso a tratar. Le enviaremos por un coste insignificante el modelo 3D y el equilibrador más indicado para conseguir el mejor resultado clínico.

- Para conseguir el mejor resultado
- Útil para evitar errores en la elección
- Eficaz para conocer el método
- Óptimo en caso de dudas




### Kit inicial

La caja fundamental para elegir el equilibrador idóneo en cada caso de tratamiento, probándolo directamente sobre el modelo. La caja está compuesta por los 15 equilibradores más utilizados, seleccionados en varios tipos. En la caja están incluidos diario, regla y spray higienizante.


# CAJA DE MODIFICACIONES

Caja patentada, permite expandir el paladar en zonas seleccionadas

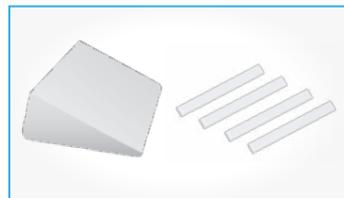

**EXCLUSIVO**  
para participantes  
en los cursos Eptamed

**EXCLUSIVO**  
Exclusivo para participantes  
en los cursos O.S.A

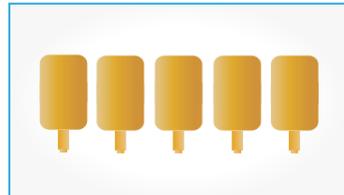

## Caja1: 10 cuñas + 10 precintos

Cuñas: dimensiones 20x30 mm, espesor máximo 3 mm  
Precintos: dimensiones 50x8 mm, espesor 2 mm.  
Realizados en tecnocaucho.

## Caja2: 18 cuñas + 2 barras redondas

Cuñas: dimensiones 20x30 mm, espesor máximo 3 mm.  
Barras redondas: Dimensiones: largo 100 mm, diámetro 10 mm, (no se muestran en la foto puesto que son de suministro exclusivo).

## Caja O.S.A.: 8facetas+ 8 piezas+ 2 rulos

Precintos: dimensiones 45x9 mm, espesor 2 mm, se perfilan a medida.  
Piezas: dimensiones 40x10x10 mm.  
Rulos a U: dimensiones 40x7x7 mm.

## Kit de fresas para modificaciones y acabados

Hemos seleccionado diferentes modelos de fresas, conformando una caja de **6 fresas** para adaptar el equilibrador a cada boca y hacer aún más simple la realización de las modificaciones.

## Fresas abrasivas

Fresas abrasivas de color beige para modificar todos los modelos de equilibradores.

## Regla para distancia entre cúspides

Regla en milímetros para elegir correctamente el justo modelo de equilibrador a utilizar en base a la distancia entre las cúspides palatinas 14 y24.

# KIT ADHESIVO / LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN



## Adhesivo instantáneo para uso médico (Eptamed 06)

- Eptamed 06 es un adhesivo instantáneo para uso médico certificado según la normativa USP CL.VOSOTROS

## Primer para uso médico (Eptamed 07)

- El primer Eptamed 07 puede ser utilizado para mejorar la propiedad del adhesivo sobre superficies con baja energía superficial, certificado para uso médico según la normativa USP CL.VI.

En Condiciones normales la humedad atmosférica activa instantáneamente el proceso de polimerización volviendo en cuestión de segundos la unión extremadamente resistente. Aunque la polimerización continua por al menos 24 horas.

## Spray para la desinfección y la limpieza (Eptamed 08)

- Un producto natural para desinfectar y limpiar el equilibrador en cualquier momento del día. Al sabor dulce y refrescante de manzana es ideal para incentivar a niños y a los adultos a llevar el equilibrador. No contiene azúcares agregados y está exento de conservantes.

## Bunsen eléctrico a inducción


- Ideal para calentar la hoja y efectuar cómodamente y velozmente las modificaciones sobre los equilibradores. Voltaje 220 Voltios, potencia 130 W, frecuencia 50 Hz.

## Triad Gel para realces

- Gel fotopolimerizable, ideal para los realces gracias a su elaboración directa sin mezclado, con gran ahorro de tiempo. Opaco a los rayos X.
- Triad Gel resina para ortodoncia, disponible en color transparente y azul, presentación de 2 o de 4 pz. de 22 g cada una.

# MARKETING Y TECNOLOGÍA

Instrumentos para promover e informar

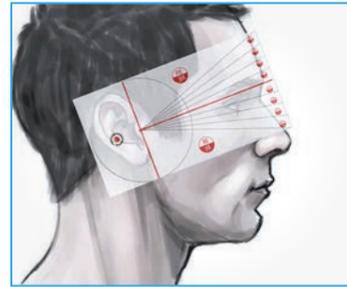

## G.O. Te goniómetro ototemporal

Útil instrumento para objetivizar en grados algunos movimientos craneales y las simetrías de las temporales derechos e izquierdos. Muy útil para monitorizar los tratamientos osteopáticos o los efectos de los aparatos sobre el esquema craneal. Deriva de estudios exhaustivos llevados a cabo por el Dr. Carrafiello, en la investigación de los efectos osteopáticos-posturales de los dispositivos Eptamed. El aparato, patentado y cubierto por copyright, está equipado de instrucciones y del código para la versión digital.



## Plantilla postural pasiva

Permite valorar con mayor facilidad las asimetrías posturales y faciales del paciente. La alternancia de los colores en las líneas permite una visualización más clara de cualquier asimetría, y el círculo central constituye un objetivo para el objetivo fotográfico, de tal manera que asegura el mismo enfoque por cada encuesta fotográfica. Dimensiones: 80x200 cm


# MARKETING Y TECNOLOGÍA

Instrumentos para promover e informar



## Fundamentos de equilibriodonzia

A cargo del Dr. Alessandro Carrafiello, Dr. Davide Besi, Dr. Luca Giannelli y Dr. Lorenzo Carrafiello. Escrito en italiano.

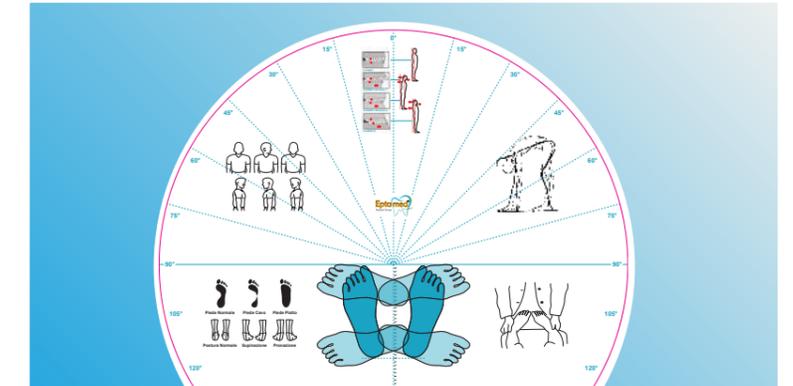


## Tapete interactivo para el análisis y para mejorar la comunicación con el paciente

Ideal en las primeras visitas, en la prueba de fukuda, en la prueba de romberg, en variadas pruebas rotatorias y para las fotos posturales. Disponible de goma blanda antideslizamiento con diámetro de 130cm.

## Pósteres publicitarios, dimensiones 50x70cm, espesor 1mm

Elegante impresión a alta resolución, para la decoración de la consulta y la sala de espera. Disponible en diferentes gráficas.

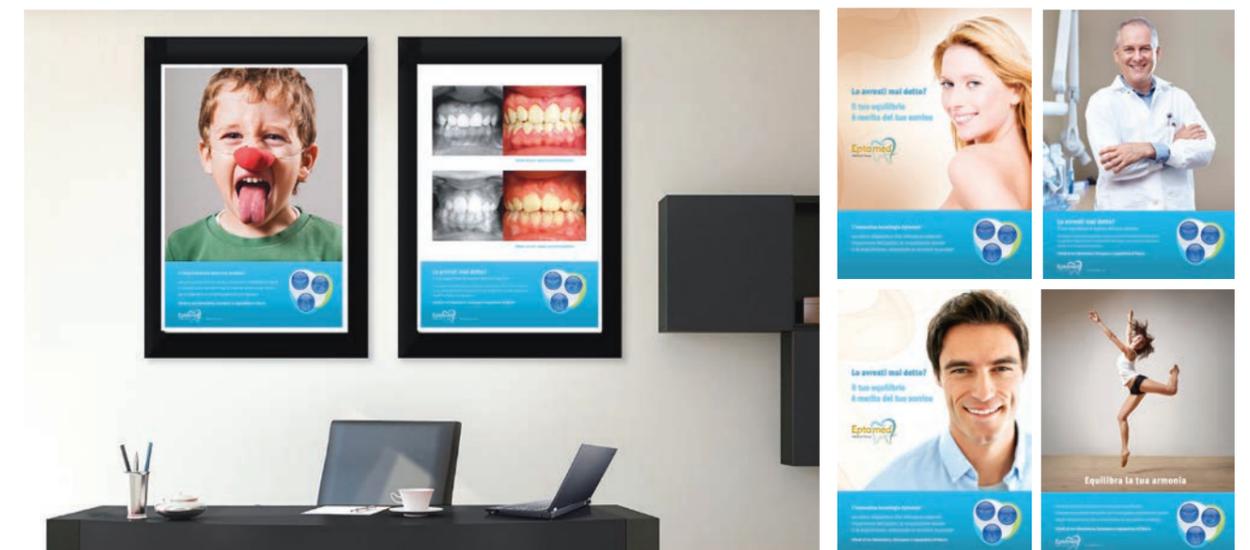

# MARKETING Y TECNOLOGÍA

Instrumentos para promover e informar


# CURSO

Eventos, conferencias y cursos promovidos por Eptamed



## EQ. TESTER

Este aparato es el instrumento ideal para detectar las interferencias de la boca sobre la postura y todas las patologías conectada a ella. Y la mejor alternativa a los rollos de algodón por funcionalidad y profesionalidad y puede ser también esterilizada en autoclave.

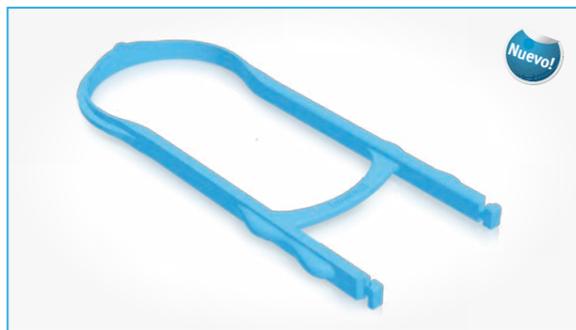

## LIMPIA LENGUA

Aparato para la limpieza de la lengua. Elimina fácilmente los restos y las toxinas que son acumuladas durante el día a través de la respiración, la digestión y los regulares procesos orgánicos. Tiene una innovativa forma para limpiar mejor el centro de la lengua y puede ser también utilizado para desdoblar la seda dental.



## Vitrina en plexicristal transparente

Brillante vitrina 180x180mm, con fondo de espejo. Da valor a su trabajo, les demuestra a sus pacientes que los equilibradores son una obra de arte.



## Modelo BIG con dosis

Modelo gigante con técnicas destacadas para las técnicas de tallados oclusales selectivos según Planas. Realizado en plástico 3D.



## Eptalota®

la práctica de limpieza y lavado de la nariz es una antigua técnica yoghi, considerada uno de los principales métodos de purificación. Es fundamental en todos los pacientes que tienen dificultad a respirar con la nariz.



Con un mínimo de 10 participantes podemos organizar cursos en todo el mundo para enseñarles cómo usar el activador.

**Envíe su propuesta a [info@eptamed.com](mailto:info@eptamed.com)**

EPTAMED SRL  
Via Ravennate, 979  
47522 Cesena (FC) ITALY

[info@eptamed.com](mailto:info@eptamed.com)  
[www.eptamed.com](http://www.eptamed.com)

El catálogo Eptamed es gratuito

Características, tamaños y dispositivos pueden variar de acuerdo al desarrollo tecnológico y modificaciones legales. Los errores de impresión de cualquier tipo, incluido detalles técnicos, no constituye base para reclamaciones legales. Las instrucciones de uso y directrices pertinentes están indicadas en la hoja de instrucción incluida en cada dispositivo. La reproducción total o parcial de este catálogo se permite sólo bajo autorización escrita de Eptamed Srl

